Научно-производственная фирма "МЕТА"



АНАЛИЗАТОР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ портативный

АКПЭ-01М-02

Паспорт

M 010.000.00-24 ΠC



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л от 0 до 1,500

Диапазон показаний, мг/л

от 0 до 5,000

Диапазон измерений и пределы допускаемой основной погрешности анализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Диапазон измерений массовой концентрации этанола, | Пределы допускаемой основной погрешности | | |
|---|--|---------------|--|
| мг/л | абсолютной | относительной | |
| 0 – 0,200 | ± 0,020 мг/л | _ | |
| св. 0,200 — 1,500 | _ | ± 10 % | |

Примечания:

- 1 В анализаторах программным способом установлен минимальный интервал показаний, которые выводятся на индикатор анализатора и бумажный носитель в виде нулевых показаний от 0,000 до 0,020 мг/л.
- 2 Пределы допускаемой основной погрешности анализаторов определены при нормальных условиях:
- диапазон температуры окружающего воздуха, °C: от 15 до 25;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха, %:от 30 до 80;
- диапазон атмосферного давления, кПа:

от 90,6 до 104,8.

Цена младшего разряда, мг/л, не более

0.005

Пределы допускаемой погрешности анализаторов в рабочих усло виях эксплуатации в зависимости от температуры окружающего воздуха приведены в таблице 2.

| | Пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях эксплуатации ¹⁾ | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|--|--|
| | | іях эксплуатации | | |
| Температура окружающего | абсолютной | относительной | | |
| воздуха ²⁾ | (в диапазоне | (в диапазоне | | |
| | | измерений св. 0,200 | | |
| | до 0,200 мг/л) | до 1,500 мг/л) | | |
| от минус 10,0 °C до минус | ± 0,035 мг/л | ± 17,5 % | | |
| 5,0 °C вкл. ³⁾ | | | | |
| св. минус 5,0 °C до 0,0 °C | ± 0,031 мг/л | ± 15,5 % | | |
| вкл. ³⁾ | | | | |
| св. 0,0 °C до 5,0 °C вкл. | ± 0,027 мг/л | ± 13,5 % | | |
| св. 5,0 °C до 10,0 °C вкл. | ± 0,025 мг/л | ± 12,5 % | | |
| св. 10,0 °C до 15,0 °C вкл. | ± 0,023 мг/л | ± 11,5 % | | |
| св. 15,0 °C до 25,0 °C вкл. | ± 0,020 мг/л ⁴⁾ | ± 10 % ⁴⁾ | | |
| св. 25,0 °C до 30,0 °C вкл. | ± 0,023 мг/л | ± 11,5 % | | |
| св. 30,0 °C до 35,0 °C вкл. | ± 0,025 мг/л | ± 12,5 % | | |
| св. 35,0 °C до 40,0 °C вкл. | ± 0,027 мг/л | ± 13,5 % | | |

1) Указанные в таблице пределы допускаемой погрешности в рабочих условиях эксплуатации определены с учетом пределов допускаемой основной погрешности и дополнительной погрешности анализаторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха. Пределы допускаемой дополнительной погрешности анализаторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 5 °C в пределах рабочих условий относительно нормальных условий составляют 0,25 в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

²⁾ Значение температуры окружающего воздуха определяется при помощи средства измерения, тип которого внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений РФ, и которое поверено в установленном порядке.

³⁾ Только для анализаторов модификации АКПЭ-01М.

⁴⁾ Указаны пределы допускаемой основной погрешности согласно таблице 1.

Дополнительные погрешности от наличия неизмеряемых компонентов приведены в таблице 3

Таблица 3

| Неизмеряемый | Содержание неизмеряемого | Дополнительная |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| компонент | компонента в газовой смеси | погрешность* ⁾ |
| Ацетон | не более 0,025 мг/л | отсутствует |
| Метан | не более 0,015 мг/л | отсутствует |
| Оксид углерода | не более 0,20 мг/л | отсутствует |

| Диоксид углерода не более 10 % (об.) | отсутствует |
|---|------------------------|
| *) не превышает 0,2 в долях от пределов допуска | емой основной |
| погрешности. | |
| Параметры анализируемой газовой смеси при г вход анализаторов (автоматический режим отбора пробы | |
| – расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не | менее 8 |
| объем пробы анализируемой газовой смеси, л, н | ве менее 1,2 |
| Время подготовки к работе после включения г окружающего воздуха (20 ± 5) °C, мин при полност батарее, не более | |
| Время измерения после отбора пробы, с, не бол | ee 5 |
| Время подготовки к работе после измерения, с, и Интервал времени работы анализаторов без кор показаний, месяцев, не менее | |
| Число измерений на анализаторах без подзарядк шт, не менее | и аккумулятора, 250 |
| Время экспресс-анализа, с | 3 |
| Время готовности к последующему экспресс-анали: | зу, с 5 |
| Электропитание: – от встроенной аккумуляторной батареи – от бортовой сети автомобиля, В – от сетевого блока питания и зарядки, В | 12,6±2 5±0,25 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более: - в режиме прогрева - в рабочем режиме Габаритные размеры измерительного блока, мм, не более | 5 0,5 195x80x50 |
| | |

Масса измерительного блока, кг, не более

0,4

1.2 Состав прибора

1.2.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 4 Таблица 4

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
|---|-------------------|------------|
| Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 1 | |
| Кабель связи с персональным компьютером | 1 | |
| Сетевой блок питания и зарядки (5±0,25) В | 1 | |
| Адаптер питания от бортовой сети автомобиля | 1 | |
| Принтер внешний | 1 | По заказу |
| Мундштук | 4 упаков ки | |
| Воронка для бесконтактного экспрессанализа | 1 | |
| Фильтр | 1 | |
| Рулон бумажной ленты для принтера | 2 | По заказу |
| Программное обеспечение версии «1.4» (или выше) на CD-диске | 1 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Методика поверки МП-242-1134-2011 | 1 | |
| Упаковочная коробка | 1 | |

Примечание - По желанию потребителя поставляются дополнительно: рулоны бумажной ленты для принтера, мундштуки

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы прибора не менее 5 лет при круглосуточной эксплуатации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка на отказ не менее 6000 ч.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие анализатора концентрации паров этанола требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев со дня продажи, но не позднее 18 месяцев со дня изготовления.
- 3.1.3 В течение гарантийного срока предприятиеизготовитель безвозмездно ремонтирует анализатор концентрации паров этанола по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем с оплатой стоимости потребителем.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
|------|--|---------------------------|-----------------------|
| | Консервация упаковыванием по варианту ВУ-IIIA ГОСТ 2316 | | |

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Анализатор к | онцентрации паров этанол | а в выдыхаемом воздухе |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ΑΚΠЭ-01M-02 M 0 ⁻ | 10.000.00 № | <u></u> |
| Упакован | | |
| | наименование или код изго | товителя |
| согласно требовани | ям, предусмотренным в де | ействующей технической |
| документации на со | ставные приборы. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| должность | личная подпись | расшифровка подписи |
| | | |
| | | |
| | | |
| год, меся | ц, число | |

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Ан | ализат | гор кон | центраци | и п | аров | этанола | В | выдыхаем | ОМ |
|----------|---------|---------|----------|-------|--------|--------------|-----|------------|----|
| воздухе | АКПЭ- | -01M-02 | заводск | ой н | омер | | ı | изготовлен | И |
| принят | В | соответ | ствии | С | обяз | зательными | 7 | гребования | ми |
| государо | твеннь | οIX | стандар | тов, | | действующе | Й | техническ | ЮЙ |
| докумен | тацией | и призн | ан годнь | ім дл | ія экс | плуатации. | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Предста | вите | пь ОТ | К | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| МΠ | | | | | | | | | |
| | ичная п | одпись | - | | расц | ифровка подп | иси | _ 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| где Где | | Наработка | | | Подпись | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Дата уста- новки | уста- нов- лено | Дата сня- тия | с начала эксплу- | после послед- него | Причина снятия | лица, прово- дившего установку |
| | | | атации | ремонта | | (снятие) |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата | Предприятие, должность и подпись | | Приме- чание |
|------|----------------------|---|--|------------|-----------------|
| | | документа) | сдавшего | принявшего | |
| | | | | | |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование | Долж- ность, | , | наименование, та документа) | Приме- чание |
|---|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| изделия (составной части) и обозначение | фамилия и инициалы | сдавшего | принявшего | |
| | | | | |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле- | Краткое | Установ- ленный | Дата | | , фамилия цпись |
|-----------------|------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| теня | содержание | срок | выполне- | выполнив- | проверив- |
| (указа- | работы | выпол- | ния | шего | шего |
| ния) | | нения | | работу | работу |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Условия хранения прибора в транспортной таре соответствуют группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

- 10.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:
 - заявку на ремонт (замену);
 - дефектную ведомость;
 - гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25, тел/факс (84862) 2-18-55, 2-39-48

Таблица поверки анализатора концентрации паров этанола АКПЭ-01М-02

| N прибора | Дата | Заключение | Поверитель |
|-----------|---------|------------------|-------------------|
| | поверки | (годен, негоден) | (подпись, оттиск) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2011/09984

от 02 февраля 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано ООО НПФ "МЕТА", Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевек, ул. Морквашинская, д.55 "А"

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)
Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-"Мета" по ТУ 9441-001-21298618-2010 следующих модификаций: АКПЭ-01.01 (перепосной), АКПЭ-01.01М (малогабаритный), АКПЭ-01М (портативный).

производства

ООО НПФ "МЕТА", Россия, 445359, Самарская область, г. Жигулевек, ул. Морквашинская, д.55 "А"

класс потенциального риска 2а

ОКП 94 4160

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 76735 от 24.12.2010

приказом Росздравнадзора от 02 февраля 2011 года № 380-Пр/11

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Е.А. Тельнова

012129

Завод-изготовитель - ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый адрес:

445359, Самарская обл. г. Жигулевск, ул. Радиозаводская 1, а/я 25, телефон: (84862) 2-18-55, 2-39-48

Гарантийный талон на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: **Анализатор концентрации паров этанола** в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01М-02

| TУ 9441-001-21298618-2010 |
|--|
| номер ТУ |
| Номер и дата выпуска |
| Приобретено |
| дата, подпись и штамп торгующей организации |
| Введено в эксплуатацию |
| Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием |
| ООО НПФ "МЕТА" города Жигулевска |

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения владельца

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕЛЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Nº POCC RU.UM25.H04811

Срок лействия с

08.04.2011

по 08.04.2014

No 0111177

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25.

"ЭНЕРГИЯ ПЛЮС". Ул. Сосновая аллея, д. 6, офис 6, г. Королев, Московской обл., тел. /факс (495) 502-888-1, 502-888-2, 502-888-9, http://www.1011455.ru.

ПРОДУКЦИЯ Анализаторы концентрации паров этаноза в цалыхаемом воздухе АКПЭ-01-«Мета» в съедующих молификациях: АКПЭ-01.01 (исполнения: АКПЭ-01.01, АКПЭ-01.01); АКПЭ-01.01 (исполнения АКПЭ-01.01М, АКПЭ-01.01М—01); АКПЭ-01М (исполнения АКПЭ-01М, АКПЭ-01М-02, АКПЭ-01М-03). ТУ 9441-001-21298618-2010.

код ОК 005 (ОКП):

94 4160

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 52770-2007, ТУ 9441-001-21298618-2010

код ТН ВЭД России:

9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПФ "МЕТА", ИНН: 6345019613.

Адрес: ул. Морквашинская, д. 55 "A", г. Жигулевск, Самарская область, 445359. Телефон (84862) 2-10-70.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО НПФ "МЕТА".

ИНН: 6345019613. Адрес: ул. Морквашинская, д. 55 "А", г. Жигулевск, Самарская область, 445359.
Телефон (84862) 2-10-70.

HA ОСНОВАНИИ Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09984 от 02 февраля 2011 г., срок действея не отраничен. Протоков испатация 624/574-2011 от 04/04/2011 г. испатательного циптра 3AO "Kosmount-Teer", рег. № РОСС RU/0001/21ABO48, г. Королев

Протовол испытация № 19К3мС/2011 от 01.94.2011 г. ИЦ ООО «ЦСМИ ВЯНИИМП», рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02, г. Москва Протовол испытация № 6913.010 от 23.07.2010 г. испытательного забератирного центра ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России, рег. № РОСС RU.000.21ИМ33. т. Москва

Сертификат № ВР 37.1.4023-2011 от 08.02.2011 г. соответствия системы менедамента вичества требованням ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.

Инспекционный контроль один раз в год.

сартификатов

Руководитель органазаместитель руководителя)

Эксперт

Р.П. Резвухин

В.А. Шандов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Been betreen DC 25a/27 (experience in A A/A) and the promption of the SE SE Co. House, and

| | декларация о соответствии |
|--|--|
| ооо нпф "мет/ | А ^{**} • манительной сорраниции или физикии или, иченный частный устройный подграмментации, приложения устройный при с соответствен. |
| Зарегистрировано 1096382001418 | Межрайовной виспекцией ФНС России № 15 по Самарской области 03 июня 2009 г. ОГРН |
| л. Морквашинска | ия, д. 55 "A", г. Жигулевск, Самарская область, 445359, телефон (84862) 2-10-70 |
| з лице генеральн | ого директора Н.В. Мартынова |
| аявляет, что | |
| АКПЭ-01.01 (жело АКПЭ-01.01М (же | щентрошин паров этаноля в выдыхнемом воздухе АКПЭ-01-«Мета» в следующих модификации мненик: АКПЭ-01.01; АКПЭ-01.01-01); полнения АКПЭ-01.01М; АКПЭ-01.01М-01); песния АКПЭ-01М; АКПЭ-01М-01; АКПЭ-01М-02; АКПЭ-01М-03). |
| выпускаемые по Т | y 9441-001-21298618-2010 |
| Серийный выпуск | |
| изготовителем ОО | оредини и оправлени выправня постоящим ображения принципа. Оправня дотноря по-стояче, чествочне. О НПФ "META". |
| THE THE STREET | |
| л. Морквашинск | ав, д. 55 "A", г. Жигулевск, Самарская область, 445359. Тел. (84862) 2-10-70 |
| Kog C | OK 005-83 (CNOT): 94 4160 |
| Kog 1 | Тн ВЭД России: 9027 10 100 0 |
| соответствует | гребованиям |
| | , FOCT P 50267.0-92, FOCT P 50267.0.2-2005, FOCT P MCO 10993-1-2009, FOCT P MCO 10993-5-200 93-10-2009, FOCT P 52776-2007 |
| Декларация при | инята на основании |
| Протокол испыта RU.0001.21AЮ48 Протокол испыта | удостоверение № ФСР 2011/09984 от 02 февраля 2011 г., срок действия не ограничен. пий 624/574-2011 от 04.04.2011 г. всиътательного центра ЗАО "Композит-Тест", рег. № РОС , г. Королея ний № 198ЭМС/2011 от 01.04.2011 г. ИЦ ООО «ЦСМИ ВНИИМП», рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02, |
| | никії № 6933.010 от 23.07.2010 г. испытательного лабораторного центра ФГУ «НИИ ФХМ» ФМІ СС RU.0001.21ИМЗЗ, г. Москва |
| | Р 37.1.4023-2011 от 08.02.2011 г. соответствия системы менедимента качества требованиям ГОСТ |
| Дата принятия | декларации: 06.04.2011 |
| | оответствии действительна до: 06.04.2014 |
| M.R. | H.B. Magnason |
| M.II. | подтись инициалы, фамилия |
| | |
| ОРГАН ПО СЕРТИ | Сведения о регистрации декларации о соответствии фикации "энергия плюс" |
| | . п. 6, офис 6, г. Королев, Москонской обл., тел. (фис. (495) 502-888-1, 502-888-2, 502-888-9, http://www.1011455 МССС RU 0001,11ИМ25 выдан 14,12,2009г. Федеральным агентством по техническому регулирования |
| 1127 | ии 06.04.2011, регистрационный номер декларации РОСС RU.ИM25.Д04790 |
| MINO GO | Н.П. Шандова |
| Wall Ball on | 3/5/ подпись инициалы, фамилия руководителя органа по бертифизирия 28 |